

Journey

Super Power BTE

Guia de Adaptação

Guia de Adaptação


BTE Super Power

Conteúdo

Visão Geral dos Aparelhos	4
Faixa de Adaptação	4
Colocação dos marcadores Direito/Esquerdo	5
Colocando e Removendo o Gancho	5
Trocando o Amortecedor do Gancho	6
Recolocando a Gaveta da Bateria	6
Gaveta de Bateria Resistente	7
Adaptador DAI/FM	8
Colocando o Adaptador DAI/FM	8
Usando o Adaptador FM	8
Usando o Adaptador DAI	8
Adaptando um BTE Super Power com EXPRESSfit	9
Colocando os Cabos de Programação	9
Informações para Pedidos	10


Visão Geral dos Aparelhos

Aparelhos super potentes são feitos para usuários de perda auditiva severa e profunda. Esse guia é destinado a ajudá-lo a lidar com os aparelhos auditivos Super Power.

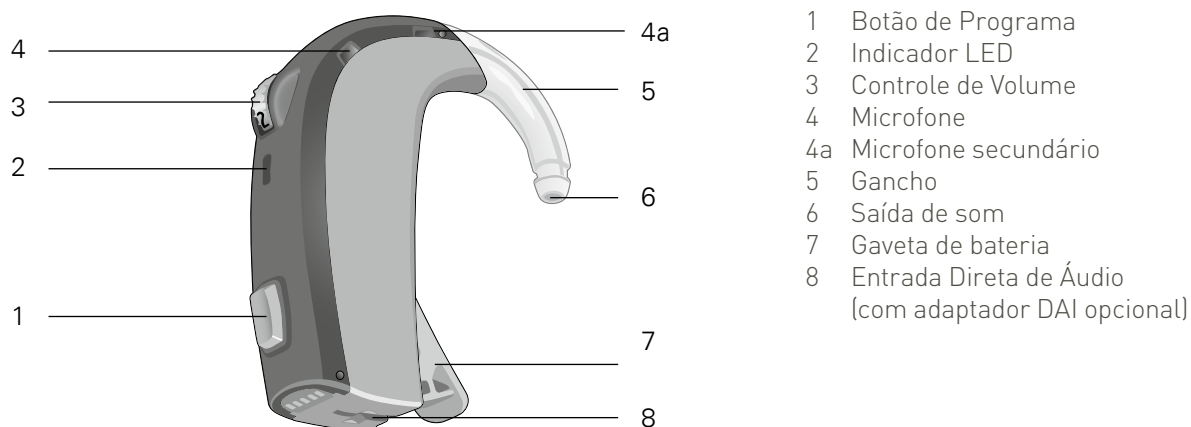


Faixa de Adaptação

A faixa de adaptação esperada para os aparelhos Super Power está mostrada abaixo.

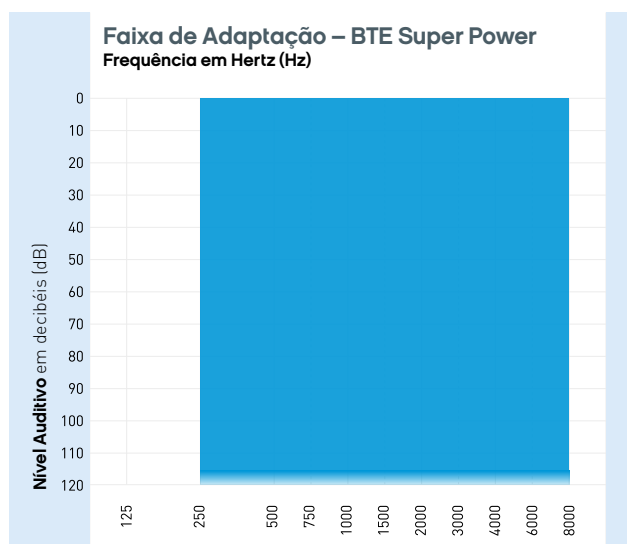

Colocação dos Marcadores Direito/Esquerdo


- 1 Abra a gaveta da bateria
- 2 Insira o marcador dentro do compartimento como mostrado
- 3 Insira e gire o marcador
- 4 Feche a gaveta da bateria

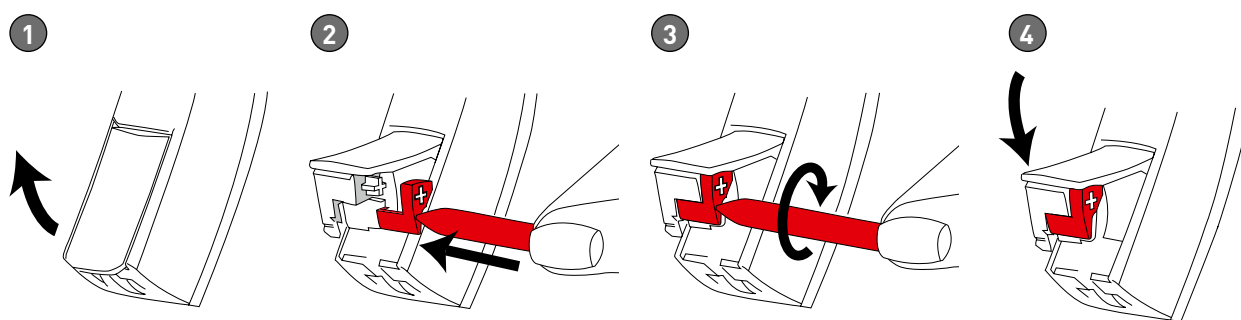

Colocando e Removendo o Gancho


O aparelho super power está disponível com gancho convencional para adultos ou na versão infantil para adaptações pediátricas. O mecanismo de troca é o mesmo para ambos ganchos.

- 1 Use a ponta da ferramenta para empurrar o pino que trava o gancho
- 2 Troque o gancho
- 3 Recoloque o pino para travar (pinças facilitam essa ação)

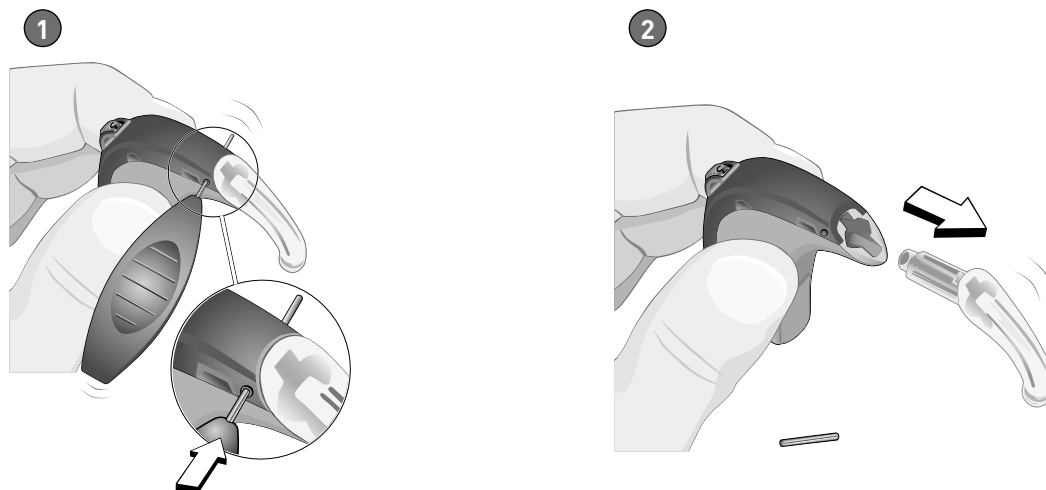


Trocando Amortecedor do Gancho

- 1 Pegue um novo amortecedor do kit
- 2 Insira a ponta vazia da ferramenta para remover o gancho existente
- 3 Insira um novo amortecedor no gancho
- 4 Descarte a ferramenta usada

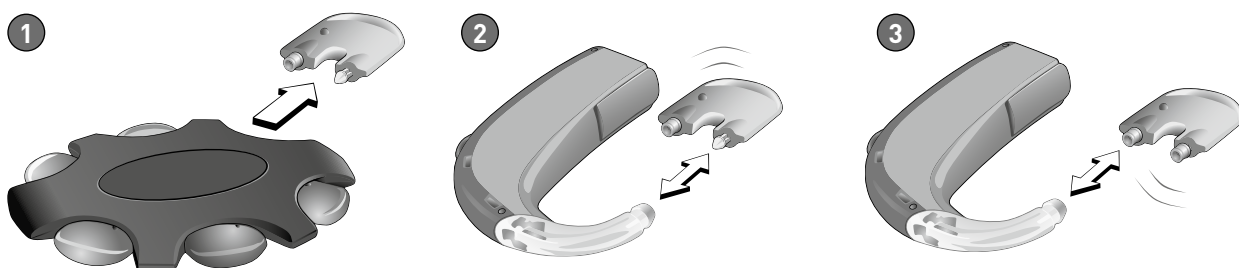

Trocando a Gaveta da Bateria

- 1 Abra a gaveta da bateria e coloque o removedor como mostrado
- 2 Delicadamente retire a gaveta
- 3 Coloque a nova gaveta e feche

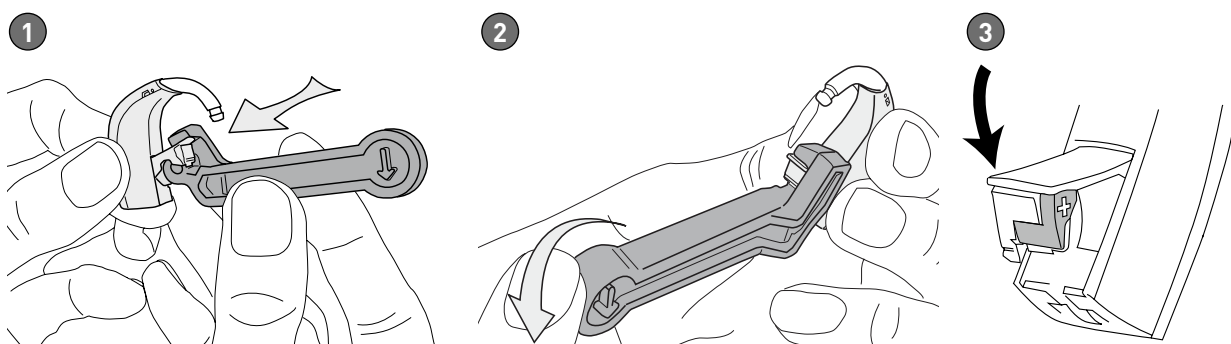


Gaveta de Bateria Resistente

O BTE super power tem uma tampa resistente que pode ser encomendada separadamente. Essa tampa é recomendada para usar com crianças e pessoas com dificuldades.


Para bloquear a gaveta, feche-a completamente. Use uma pequena chave de fenda para bloquear a trava de forma que a linha fique na horizontal. Para desbloquear, gire a trava de forma que a linha fique na vertical.

Insira uma pequena ferramenta na parte inferior do aparelho e empurre para abrir.


Travado

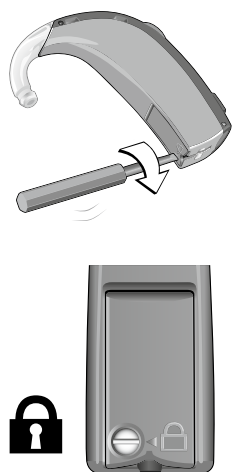

Destravado

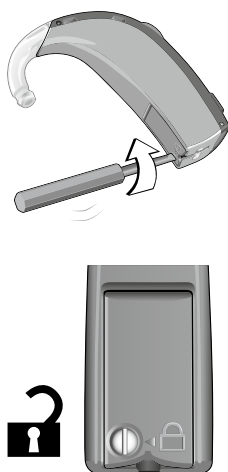


Gaveta da bateria com tampa resistente

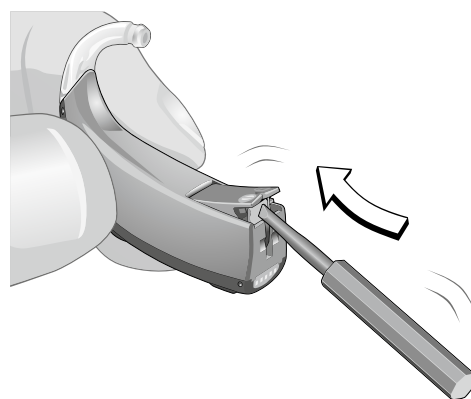

Adaptador DAI/FM

Colocando o adaptador DAI/FM

- 1 Abra a gaveta da bateria completamente
- 2 Insira o adaptador DAI/FM dentro do compartimento até alinhá-lo com o aparelho auditivo
- 3 Feche novamente a gaveta da bateria e conecte o acessório desejado

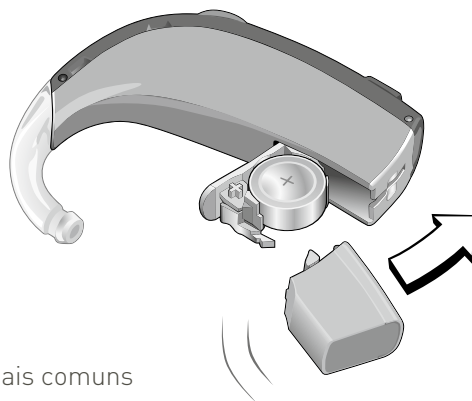


Usando o Adaptador FM

O aparelho Super Power é compatível com os Sistemas FM mais comuns (receptores FM). A conexão é estabelecida via Europlug. Também escolha o adaptador FM quando usar o microfone CROSS junto ao aparelho auditivo.

Usando o Adaptador DAI


Entrada Direta de Áudio (DAI) permite ao aparelho auditivo receber sinais diretamente de dispositivos externos como TV, rádio, saída do computador, tocador MP3, etc.

O adaptador DAI oferece uma conexão Europlug para estabelecer um acoplamento com fio através do cabo DAI a uma fonte externa.

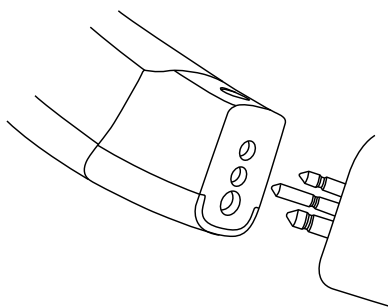


O adaptador DAI vem com dois trimmeres ajustáveis.

Use o trimmer na fonte para ajustar o volume individual.

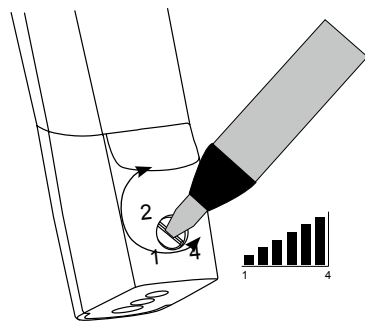

O trimmer no topo seleciona a entrada da impedância.

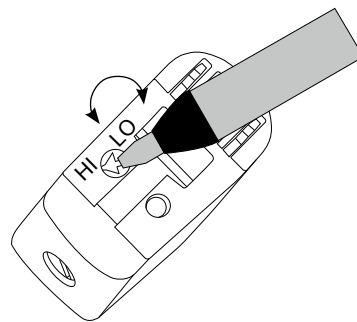

Posição HI: TV, som, tocador MP3, computador, etc
Posição LO: solução FM


Ajustando um BTE Super Power com o EXPRESSfit

Aparelhos BTE super power são programados com o EXPRESSfit usando o cabo de programação padrão (nº2).

Por favor sempre insira uma nova bateria para otimizar a programação.

Para seu conforto os modelos Super Power também são compatíveis com os programadores sem fio FittingLink e o nEARcom.

Colocando o Cabo de Programação

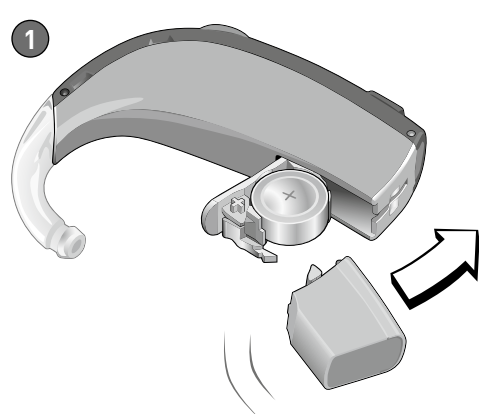

- 1 Abra a gaveta da bateria completamente e deslize o adaptador de programação no compartimento até alinhá-lo com o aparelho auditivo



- 2 Feche a gaveta de bateria novamente e conecte o cabo como mostrado

Informação sobre pedido

Acessórios e Adaptadores

Produtos	Comentários	Número serial
Adaptador de Programação		399-50-640-00
Adaptador DAI	Produto SBO	147602
Adaptador FM	Produto SBO	147435
Unidade de microfone CROSS	Produto SBO	153877

Cabos de Programação

Produtos	Comentários	Número serial
Cabo de Prog., N°2, padrão novo (hiPro) Azul, esquerdo		120902
Cabo de Prog., N°2, padrão novo (hiPro) Vermelho, Direito		120900
Cabo de Prog., N°2, padrão novo (NOAHlink) Azul, esquerdo		3003388
Cabo de Prog., N°2, padrão novo (NOAHlink) Vermelho, Direito		3003387

Interface de Programação

Produtos	Comentários	Número serial
FittingLINK	Interface de programação sem fio	144720

Ganchos

Produtos	Comentários	Número serial
Gancho adulto		571-01-140-00
Gancho adulto com amortecedor		106141
Elementos amortecedores	Kit filtro com 6 adaptadores	689-30-212-00

Marcadores Direito/Esquerdo

Produtos	Comentários	Número serial
Kit plug colorido direito/esquerdo	1 vermelho e 1 azul	101217

Ferramentas

Produtos	Comentários	Número serial
Ferramenta de retirada da gaveta de bateria		101484
Ferramenta para destravar o pino		890-22-270-00

Itens Pediátricos

Produtos	Comentários	Número serial
Gaveta de bateria resistente castanho JN80		144308
Gaveta de bateria resistente castanho JN40		145605
Gaveta de bateria resistente cinza escuro JN80		145606
Gaveta de bateria resistente cinza escuro JN40		145607
Gancho pediátrico		571-01-110-00
Gancho pediátrico com amortecedor		106168
Kit Pediátrico Sonic	Kit Pediátrico contém: · Bolsa com alça opcional · Kit de limpeza e secagem · Flanela de limpeza · Tubo de Escuta/ Estetoclips · Testador de bateria · Otoclip · Bicho de pelúcia · Guia de Instrução Pediátrico	153143

